



Sterisafe DURO A3

Die intelligente, richtungsweisende Lösung
zur Sterilisation flexibler Endoskope

Sterisafe DURO A3

Die intelligente, richtungsweisende Lösung zur Sterilisation flexibler Endoskope

Flexiblen Endoskopen bietet der **Sterisafe DURO A3** eine sichere Lagerung in einem Sterilbarriere- und Verpackungssystem nach DIN EN ISO 11607. Er ist für Plasma-, Ethylenoxid- und Formaldehyd-Sterilisationsverfahren geeignet. Dadurch können Reparatur- und Wartungskosten für flexible Endoskope reduziert werden.

Das **Sterisafe DURO A3-Set** besteht aus dem Sterisafe DURO A3 und der Toolsafe Gitterunterlage.

Weniger ist mehr!

Anwenderfreundlich – wartungsfrei – prozesssicher


Weniger Personalaufwand, Entsorgungs- und Materialkosten

- Keine sterile Umverpackung erforderlich
- Durch die bewährte Pasteursche Schleife entfällt ein Dichtungswechsel

Mehr Sicherheit bei Sterilisation, Lagerung und Transport





- Geeignet für Gas- und Plasma-Sterilisation
- Nachgewiesene Materialschonung des Endoskops während der Plasma-Sterilisation (Sterrad-Verfahren), d.h. längere Wartungsintervalle
- Integrierte Prozessindikatoren am Filtermaterial (EO, FA und Plasma-Sterilisation)
- Sichere Lagerung und Transport aller flexiblen Richard Wolf Endoskope
- Alkalische Aufbereitung > pH 10 möglich
- Stapelbar

Sterisafe DURO A3 arbeitet nach dem Prinzip der **Pasteurschen Schleife** zwischen Deckel und Unterteil. Eine zusätzliche Dichtung ist nicht mehr erforderlich.

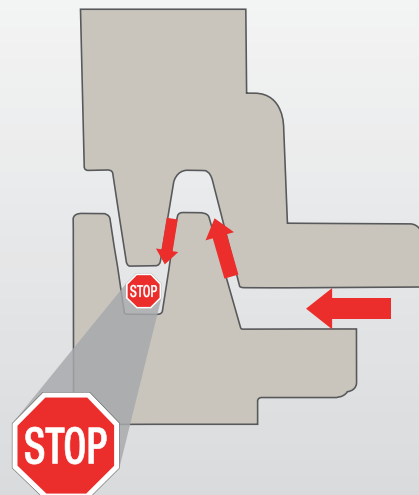


Durch den Einsatz von transluzentem, formbeständigem Hochleistungskunststoff ist der Sterisafe DURO A3 extrem bruchstabil.

Die Toolsafe Gitterunterlage aus Silikon bietet flexiblen Endoskopen zusätzliche Sicherheit durch die speziell geformte Gitterstruktur mit entsprechenden Positionierungshilfen.

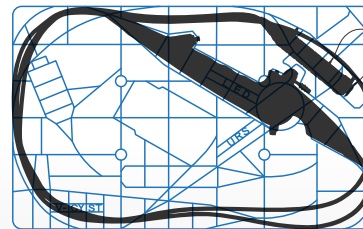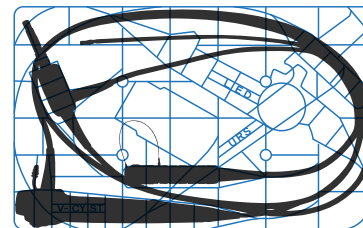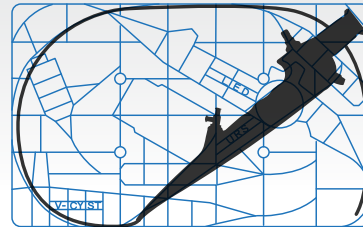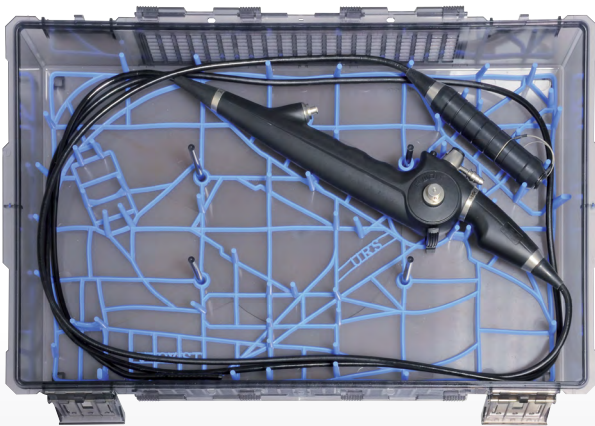

Beispiele
für Lagerung

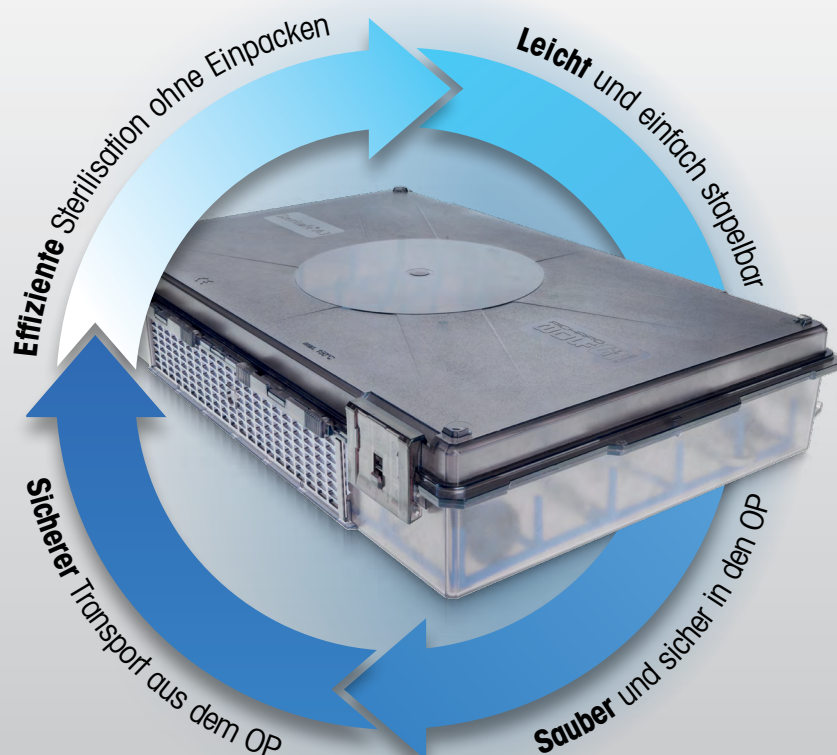

Sterisafe DURO A3

und Zubehör



spirit of excellence

Sterisafe DURO A3-Set, für Plasma-Sterilisation

bestehend aus:

Sterisafe DURO A3 (382031003), Toolsafe

Gitterunterlage (382031101),

Einwegfilter für H_2O_2

(VE = 100 St., 382031401) 382032000

Sterisafe DURO A3-Set, für EO und FA

bestehend aus:

Sterisafe DURO A3 (382031003), Toolsafe

Gitterunterlage (382031101),

Einwegfilter für EO und FA

(VE = 100 St., 382031501) 382032100

Zubehör

Einwegfilter,

VE = 100 St.,

für H_2O_2 382031401

für EO und FA 382031501

Etikettenhalter, universal 382031203

Sicherungsplombe, VE = 100 St. 382031202



Technische Informationen

Außenmaße (L x B x H): 450 x 292 x 87 mm

Innenmaße (L x B x H): 420 x 265 x 75 mm

Filtersystem:

Einmalfilter für Plasma-Sterilisations-Verfahren
(STERRAD®, H_2O_2),

Einmalfilter für Ethylenoxid- (EO) und Formaldehyd- (FA)
Sterilisations-Verfahren

Änderungen vorbehalten.

J 611 IX.17.de.2

